

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της νοσοκομειακής κλίνης για χρονικό διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς και service και ανταλλακτικά για 10 έτη.
2. Η εγγύηση καλύπτει ελαττώματα των υλικών και της κατασκευής και περιλαμβάνει τόσο τα υλικά όσο και την εργασία επισκευής
3. Σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα, η εταιρεία θα επισκευάσει η αντικαταστήσει τα ελαττωματικά εξαρτήματα η θα αντικαταστήσει ολόκληρη την ελαττωματική συσκευή σύμφωνα πάντα με την κρίση του τεχνικού της.
4. Η εγγύηση ισχύει μόνον εφόσον επιδειχθεί η νόμιμη απόδειξη αγοράς της συσκευής οπού και θα αναφέρεται η ημερομηνία αγοράς.
5. Η διάρκεια της εγγύησης (3 έτη) παρατείνεται υστέρα και μόνον από την σύμφωνη γνώμη της εταιρείας.
6. Τα έξοδα μεταφοράς της κλίνης προς και από το συνεργείο βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή.
7. Απαγορεύεται η μεταβίβαση της εγγυήσεως σε τρίτα πρόσωπα.

Η ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ :

1. Συσκευές που επισκευαστήκαν από τον αγοραστή η αλλά μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
2. Εξαρτήματα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά, όπως μανιβέλα, ρόδες κλπ.
3. Βλάβες που οφείλονται σε αμέλεια του αγοραστή, κακή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση.
4. Συσκευές που δεν χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως.
5. Βλάβες που προκληθήκαν κατά την μεταφορά στο συνεργείο.


Τηλέφωνο: 210 29.23.783

Website: <http://anorthosis.com.gr>

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ - ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ
2 Μανιβέλες - Πολύσπαστη

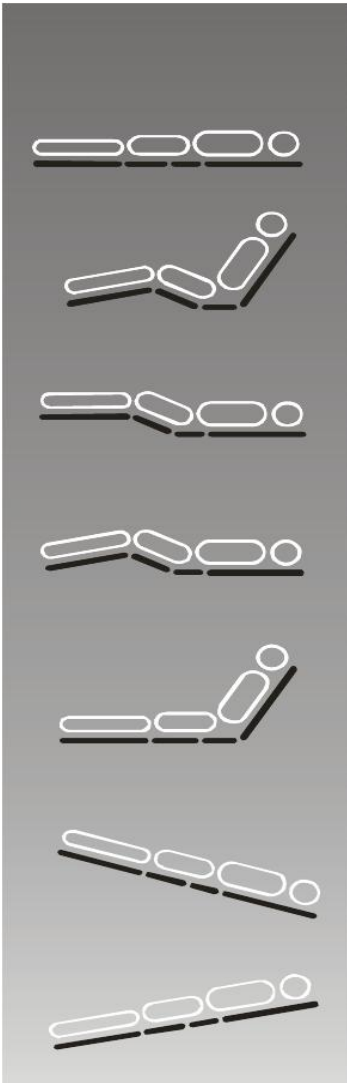



ΜΕΡΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ:

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. ΣΩΜΙΕ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ
2. ΜΕΤΩΠΕΣ ΧΡΩΜΙΟΥ
3. ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΦΟΡΜΑΙΚΕΣ
4. ΠΛΑΙΝΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
5. ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΩΜΙΕ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΦΡΕΝΟ
2. ΠΛΑΙΝΟ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
3. ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΕΛΞΗΣ

Διαστάσεις	90 × 203 cm
Απόσταση από το έδαφος	50 cm
Μέγιστο βάρος ασθενούς	120 kg

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ

Τοποθετούμε τις γωνίες του σομιέ στις ειδικές υποδοχές που υπάρχουν στις μετώπες και έπειτα εφαρμόζουμε τις βίδες.

Τηλέφωνο: 210 29.23.783

Website: <http://anorthosis.com.gr>

Στην συνέχεια τοποθετούμε τα στηρίγματα για το στρώμα στις στρογγυλές υποδοχές που υπάρχουν εσωτερικά του σομιέ. (τοποθετούνται προαιρετικά και για καλύτερη στήριξη του στρώματος)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μεγάλα στηρίγματα του στρώματος τοποθετούνται στο πάνω μέρος του σομιέ (στο ερεισίνωτο πλάτης)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ

Για την ανύψωση του κορμού του ασθενούς γυρίζουμε την μανιβέλα δεξιόστροφα.

Στα μοντέλα με δύο μανιβέλες για την ανύψωση κορμού και ποδιών, γυρίζουμε τις μανιβέλες πάλι δεξιόστροφα (ταυτόχρονα ή μεμονωμένα)

Το προϊόν διαθέτει πιστοποιητικό **CE**

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ ΑΝ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΗΣ.

ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ :

S/N :

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

-----/-----/-----

Τηλέφωνο: 210 29.23.783

Website: <http://anorthosis.com.gr>