



2507



2507WC

Τα αναπηρικά αμαξίδια παραδίδονται συναρμολογημένα.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα αναπηρικά αμαξίδια πρέπει να χρησιμοποιούνται από άτομα με περιορισμένη κινητικότητα και βάρους έως 100 kgr. για τις μετακινήσεις εντός και εκτός σπιτιού.

Πριν χρησιμοποιήσετε το αμαξίδιο ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι:

- Οι ρόδες και τα υποπόδια είναι τοποθετημένα και οι βίδες που τα στερεώνουν είναι καλά σφιγμένες.
- Τα φρένα λειτουργούν κανονικά.
- Δεν υπάρχουν ρωγμές ή σπασίματα στο σκελετό, στα σημεία συγκολλήσεων και στα μπροστινά πτυρούνια των τροχών.
- Τα πλαϊνά πλαίσια είναι τοποθετημένα κανονικά και ο πείρος στερέωσης στη θέση ασφάλισης.
- Η θέση και η πλάτη είναι σε καλή κατάσταση χωρίς φθορές που μπορεί να μειώσουν την αντοχή τους.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το αμαξίδιο μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

#### ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- ⇒ Να μη χρησιμοποιείτε το αμαξίδιο για σπορ ή άλλες επικίνδυνες δραστηριότητες. Έκκεντρη στήριξη, υπερβολική κάμψη του σώματος προς τα πίσω ή στήριξη σε 2 μόνο ρόδες μπορεί να προκαλέσουν ανατροπή του αμαξίδιου.
- ⇒ Όταν κάθεστε ή σηκώνεστε από το αμαξίδιο πρέπει να τοποθετούνται τα φρένα ώστε το αμαξίδιο να παραμένει ακίνητο και να μη γλιστρά.
- ⇒ Όταν σηκώνεστε από το αμαξίδιο πρέπει να στηρίζεστε και στα δύο χέρια ισομερώς.
- ⇒ Να ελέγχετε τακτικά τον αέρα των αεροθαλάμων. Μη φουσκώνετε τις ρόδες υπερβολικά, ιδίως το καλοκαίρι.
- ⇒ Όταν κάθεστε ή σηκώνεστε από το αμαξίδιο προσέξτε να μην αγκιστρωθούν τα ρούχα σας σε αυτό.
- ⇒ Μην αφήνετε το αμαξίδιο βρεγμένο.
- ⇒ Να καθαρίζετε τακτικά το αμαξίδιο, ιδίως την πλαστική επένδυση.
- ⇒ Μην αφήνετε παιδιά κοντά στο αμαξίδιο χωρίς επίβλεψη.