



9380

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Το κάθισμα τουαλέτας ανυψωτικό παραδίδεται συναρμολογημένο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το κάθισμα τουαλέτας ανυψωτικό πρέπει να χρησιμοποιείται τοποθετημένο πάνω από την τουαλέτα ως υπερυψωμένη θέση ή ως ανεξάρτητη τουαλέτα σε άλλο μέρος του σπιτιού από άτομα μέχρι μέγιστου βάρους 100 κιλών.

ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ

- ⇒ Τα 4 πόδια είναι κανονικά τοποθετημένα με τα μούτωνα στο ίδιο ύψος ώστε το βοήθημα να είναι οριζόντιο και να στέκεται σταθερά στο έδαφος.
- ⇒ Η θέση με την τρύπα είναι καλά στερεωμένη με τις βίδες.
- ⇒ Το μαξιλάρι εφαρμόζει καλά στην θέση με την τρύπα.
- ⇒ Δεν υπάρχουν ρωγμές ή σπασίματα στον σκελετό.
- ⇒ Εφόσον σε κάτι από τα παραπάνω υπάρχει πρόβλημα **ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ** το βοήθημα μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- ⇒ Όταν σηκώνεστε από το βοήθημα πρέπει να στηρίζετε και στα δύο χέρια ισομερώς.
- ⇒ Όταν κάθεστε ή σηκώνεστε από το βοήθημα προσέξτε να μην αγκιστρωθούν τα ρούχα σας στο αμαξίδιο.
- ⇒ Να καθαρίζετε το βοήθημα τακτικά και ιδιαίτερα τα πλαστικά του μέρη.
- ⇒ Να καθαρίζετε τη βοήθημα χρησιμοποιώντας ένα ελαφρύ καθαριστικό ή ζεστό νερό με σαπούνι.
- ⇒ Μην αφήνετε το βοήθημα βρεγμένο.
- ⇒ Μην αφήνετε παιδιά να χρησιμοποιούν το βοήθημα χωρίς επίβλεψη.