



9386

Το κάθισμα τουαλέτας – μπάνιου με δοχείο παραδίδεται συναρμολογημένο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το κάθισμα τουαλέτας – μπάνιου με δοχείο πρέπει να χρησιμοποιείται τοποθετούμενο πάνω από την τουαλέτα ως υπερυψωμένη θέση ή ως ανεξάρτητη τουαλέτα σε άλλο μέρος του σπιτιού από άτομα βάρους έως 110 κιλά.

Πριν το χρησιμοποιήσετε **ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ** ότι:

- Τα 4 πόδια είναι κανονικά τοποθετημένα με τα μπουτόν στο ίδιο ύψος ώστε το βοήθημα να είναι οριζόντια ευθυγραμμισμένο και να στέκεται σταθερά στο έδαφος.
- Η κουλούρα και το σκέπασμα να είναι καλά στερεωμένα.
- Δεν υπάρχουν ρωγμές ή σπασίματα στο σκελετό.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε το κάθισμα μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- ⇒ Όταν σηκώνεστε από το βοήθημα πρέπει να στηρίζετε και στα δύο χέρια ισομερώς.
- ⇒ Όταν κάθεστε ή σηκώνεστε από το βοήθημα προσέξτε να μην αγκιστρωθούν τα ρούχα σας στο αμαξίδιο.
- ⇒ Να καθαρίζετε το βοήθημα τακτικά και ιδιαίτερα τα λευκά πλαστικά του μέρη.
- ⇒ Να καθαρίζετε τη σανίδα χρησιμοποιώντας ένα ελαφρύ καθαριστικό ή ζεστό νερό με σαπούνι.
- ⇒ Μην αφήνετε το βοήθημα βρεγμένο.
- ⇒ Μην αφήνετε παιδιά να χρησιμοποιούν το βοήθημα χωρίς επίβλεψη.